

Counters, Hecht-ASSISTENT CE Counters

Die elektronischen Zähl- und Speichergeräte COUNTER AC-8, AC-12 und AC-15 mit 8, 12 bzw. 15 Eingabetasten erleichtern das Auszählen des Blutbildes. Sie beenden automatisch bei jeweils einer vollen Hundertzahl den Zählvorgang. Über die jeweilige Hundertzahl kann weitergezählt werden bis max. 1000.

Der Zählvorgang lässt sich bei jeder beliebigen Zahl stoppen. Die eingespeicherten Zahlen können prozentual oder auch real abgefragt werden. Das Abfragen kann beliebig oft erfolgen und beliebig oft von prozentual auf real umgeschaltet werden.

Um ein unbeabsichtigtes Löschen zu verhindern, bleibt ein kurzes Niederdrücken der Taste "Clear" ohne Einfluss; das Löschen des Speichers erfolgt bei niedergedrückter Taste erst nach ca. 1 bis 2 Sekunden.

Mit Drücken der Taste "error corr" kann die letzte Eingabe in einen Einzelspeicher, falls diese versehentlich falsch eingegeben wurde, in Einzel- und Gesamtspeicher gelöscht werden.

Technische Daten:

Maße: 19,5 × 15 × 3 cm
Anschluss: 220 V~, 50 Hz, 3 W (COUNTER AC-8 und -12)
220 V~, 50 Hz, 6 W (COUNTER AC-15)

Artikel	Best.-Nr.
① Counter AC-8	87 18 10008
② Counter AC-12	87 18 10012
Counter AC-12 mit eingebautem Akku	87 18 10013
Counter AC-15	87 18 10015
Zähltasten mit Leuchtanzeige und 4 definierten Programmen sowie einem freien Zählprogramm	
Counter AC-15 mit PC-Anschluss	87 18 10016
Microsoft Windows 2000 oder XP Home/Professional	

